

Deriffa Sass

SPA - MEDICAL



PRZ-200

**Electrocauterio
de alta frecuencia 200 W**




Especificaciones técnicas

- Tiene la función de compensación automática, estable
- Potencia de salida y pérdida mínima.
- Se puede utilizar para corte bajo el agua incluyendo tejido
- Corta en zonas ricas en grasa
- Rango de temperatura ambiental: 5 C ~ 40 C
- Rango de humedad relativa: <80;
- Rango de presión atmosférica: 86.0-106.0 kpa;
- Fuente de alimentación: 220V (+ 22V), 50Hz (+1)
- Frecuencia de trabajo: 360-460 kHz
- Potencia nominal del equipo: 880 VA + 10%
- Tipo de equipamiento: CF
- El consumo de energía de toda la máquina es inferior a 1000VA

Descripción

- Potencia máxima de salida: 200W
- Modo de trabajo: 2 tipos de corte
- 2 tipos de Coag
- 1 tipos de coagulación bipolar
- Tiene función de memoria, reinicia la potencia de la última sesión
- Tiene un control de calidad de contacto de electrodo neutro.
- Circuito, detección y área de placa de contacto con el paciente.
- Área de contacto eficaz, evaluación de placas y sistema cutáneo.
- Si el área de contacto se encuentra a un nivel peligroso, corta automáticamente el sistema de salida, y enciende la alarma.
- Un solo polo y una placa negativa bipolar pueden ser detectados

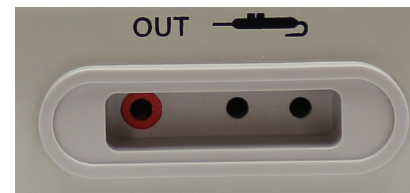

Funciones

Corte: Potencia de salida máxima: 200W (carga 500)
Corte mixto: potencia de salida máxima: 150 W (carga 500)
Coag 1: potencia de salida máxima: 100W (carga 500)
Coag 2: Potencia de salida máxima: 80W (carga 500)
Coil bipolar: potencia de salida máxima: 50W (carga 200)

Características de funciones

- Corte: corte puro, su efecto es corte fino, tejido superficie fresca sin costra;
- Corte mixto 1: Produce un efecto de coagulación en el corte.
- Coag I: se puede llamar electrocoagulación suave o punto coagulación. Tiene una capa de coagulación relativamente profunda y un ámbito de acción relativamente pequeño.
Se puede utilizar con endoscopia.
- Coag 2: puede llamarse electrocoagulación fuerte, también conocido como coagulación superficial, coagulación relativamente rápida, mayor área de acción
- Coagulación bipolar: Puede lograr rápidamente el efecto de coagulación en el momento de la puesta en marcha, corta automáticamente la potencia de salida durante la coagulación tisular, logra excelentes resultados.

Compatibilidad

- Compatibles con procedimientos de electrocirugía y cirugía Laparoscópica de diversas especialidades tales como:

Cirugía general y sus subespecialidades.
Urología
Cirugía laparoscópica
Ginecología y obstetricia
Traumatología y ortopedia
Cirugía pediátrica
Y demás especialidades medico quirúrgicas.
- También funciona para realizar procedimientos menores a manera de electrofulguración/cauterización y demás en algunas especialidades tales como:

Ginecología
Dermatología
Urología





55 2390 7756



ventas@derillasass.com
gamuroli@gmail.com



www.derillasass.com



AngelSkin



ANGELSKIN