


Deriffa Sass

SPA - MEDICAL



PRZ 300 PLUS

Electrocauterio
de alta frecuencia 350 W

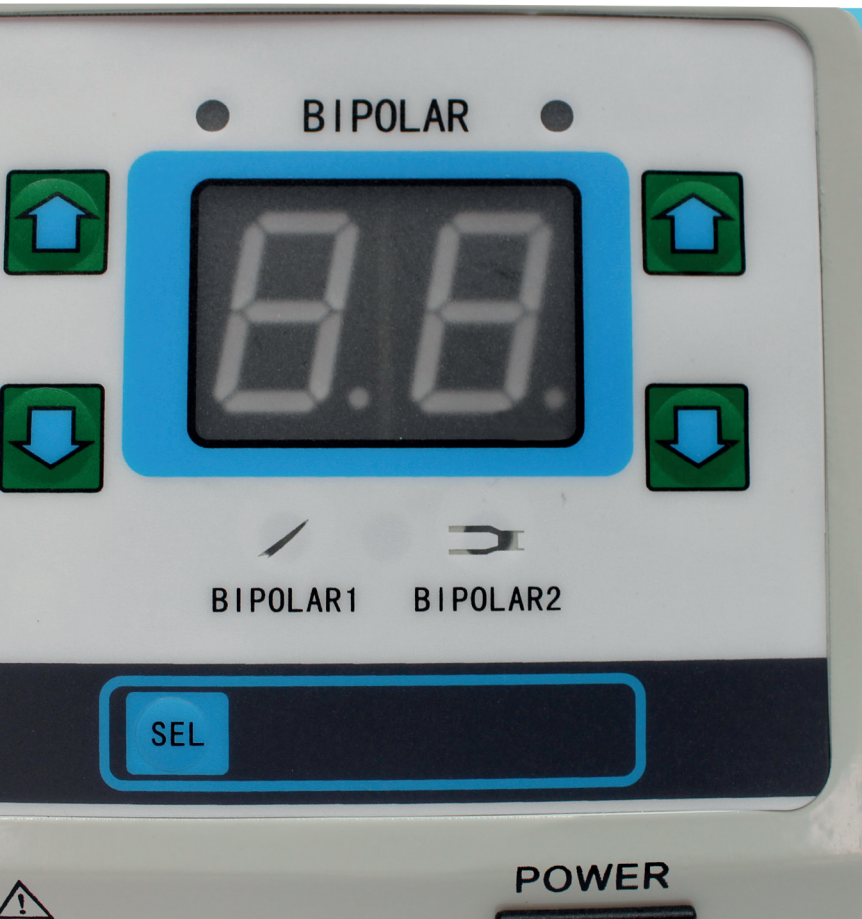


Especificaciones técnicas

- Rango de temperatura ambiental: 5 C ~ 40 C
- Rango de humedad relativa: < 80
- Rango de presión atmosférica: 86.0-106.0 kpa
- Frecuencia de trabajo: 360-460 kHz
- Potencia nominal del equipo: 880 VA + 10%
- Tipo de equipo: CF
- El consumo de energía de toda la máquina es inferior a 1000VA

Descripción

- Función de conversión automática unipolar y bipolar
- Puerto de salida de endoscopio independiente y una clave de conversión inteligente
- Después del inicio, la autorregulación ingresa al modo endoscópico
- Función de memoria de reiniciar el registro de salida en el arranque
- Pantalla digital grande de alta definición
- Tiene la función de monitoreo automático de encendido y apagado y detección automática en el trabajo y mensajes de error
- Puede trabajar bajo el agua, cooperar con el sistema de argón, endoscopia, histeroscopia, etc.
- Con el sistema de detección de calidad de contacto de la placa de electrodos del circuito del paciente, detección en tiempo real del contacto entre circuito de electrodos y la piel del paciente, una vez que se reduce el área de contacto, la resistencia aumenta a un nivel inseguro, la máquina detiene automáticamente la salida y las alarmas.

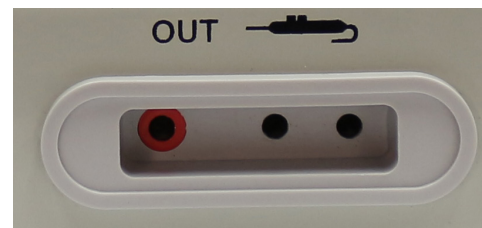

Características de funciones

- Corte: Potencia máxima de salida: 300W (carga 500)
Corte mixto 1: Potencia máxima de salida: 200 W (carga 500)
Corte mixto 2: Potencia de salida máxima: 150 W (carga 800)
Coag I: Potencia máxima de salida: 120W (carga 800)
Coag 2: Potencia máxima de salida: 80W (Carga 500)
Coag 1: Potencia máxima de salida: 50W (carga 200)
Bipolar Coag 2: Potencia máxima de salida: 50W (carga 200).



Funciones

- Corte: corte puro, el efecto es corte fino, superficie del tejido fresca sin costra
- Corte mixto 1: el efecto es la coagulación en el corte; Se puede utilizar bajo endoscopio
- Corte mixto 2: el efecto es proporcionar un buen efecto de coagulación durante el corte, que puede usarse con argón
- Coag1: se le puede llamar electrocoagulación fuerte. Tiene una capa de coagulación relativamente profunda en los tejidos y un alcance de acción relativamente pequeño. Se puede usar con endoscopios.
- Coag 2: se puede llamar electrocoagulación por chorro, que puede proporcionar una coagulación sin contacto efectiva y puede ser utilizado con el sistema de argón.
- Bipolar Coag 1: se puede llamar electrocoagulación bipolar rápida. Puede lograr el efecto de la coagulación en el momento de la puesta en marcha y reducir la tasa de mal funcionamiento durante la operación.
- Bipolar Coag 2: se puede llamar electrocoagulación bipolar fina. Puede lograr rápidamente el efecto de coagulación en el momento de inicio, corta automáticamente la transfusión de energía durante la coagulación del tejido, logra excelente efecto de coagulación, y previene eficazmente la adhesión del tejido.

Compatibilidad

- Compatibles con procedimientos de electrocirugía y cirugía Laparoscópica de diversas especialidades tales como:

Cirugía general y sus subespecialidades.

Urología

Cirugía laparoscópica

Ginecología y obstetricia

Traumatología y ortopedia

Cirugía pediátrica


Y demás especialidades medico quirúrgicas.

- También funciona para realizar procedimientos menores a manera de electrofulguración/cauterización y demás en algunas especialidades tales como:

Ginecología

Dermatología

Urología

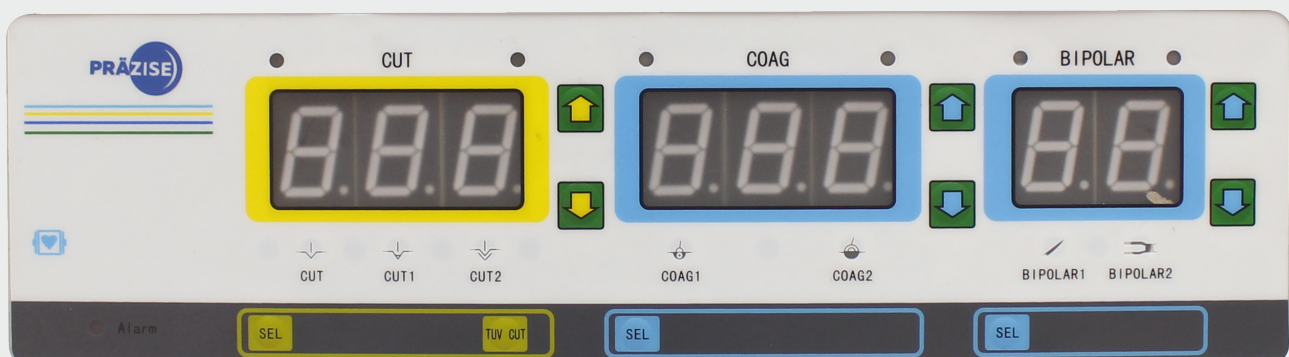

Accesorios



55 2390 7756



ventas@derillasass.com
gamuroli@gmail.com



www.derillasass.com



AngelSkin



ANGELSKIN