

Deriffa Sass

SPA - MEDICAL



PRZ-400

**Electrocauterio
de alta frecuencia 400 W**




Especificaciones técnicas

- Tiene la función de compensación automática, estable
- Potencia de salida y pérdida mínima.
- Se puede utilizar para corte bajo el agua incluyendo tejido
- Corta en zonas ricas en grasa
- Rango de temperatura ambiental: 5 C ~ 40 C
- Rango de humedad relativa: <80;
- Rango de presión atmosférica: 86.0-106.0 kpa;
- Fuente de alimentación: 220V (+ 22V), 50Hz (+1)
- Frecuencia de trabajo: 360-460 kHz
- Potencia nominal del equipo: 880 VA + 10%
- Tipo de equipamiento: CF
- El consumo de energía de toda la máquina es inferior a 1000VA

Ventajas del producto:

- Con la función de memoria, el valor de potencia se ajusta al del ultimo uso.
- Con un control de calidad de contacto de electrodo neutro circuito, puede detectar el área de contacto entre la placa y el paciente, y sistemáticamente detecta y evalúa el area efectiva de contacto entre la placa y la piel.
Una vez se encuentra que el área de contacto cae a un nivel peligroso, el el sistema corta automáticamente la salida y emite una alarma rápido. Puede detectar el uso de unipolar y bipolar
- Tiene la función de compensación automática, estable potencia de salida y mínima pérdida.
- Se puede usar para cortar bajo el agua, incluido el tejido corte en zonas ricas en grasas.

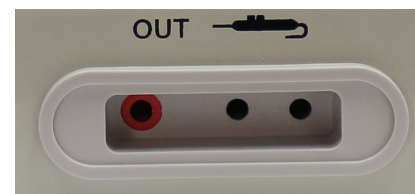

Características de funciones

- Corte: corte puro, su efecto es corte fino, tejido superficie fresca sin costra
- Corte mixto 1: el efecto es un ligero efecto de coagulación en corte.
- Corte mixto 2: el efecto es proporcionar un poderoso efecto de coagulación al cortar
- Coag1: se puede llamar electrocoagulación suave o punto coagulación. Tiene una capa de coagulación relativamente profunda y un alcance de acción relativamente pequeño. Se puede usar con endoscopia.
- Coag 2: también se puede llamar electrocoagulación fuerte conocido como coagulación de superficie, coagulación relativamente rápida, área de acción más grande.
- Bipolar Coag 2: se puede llamar electrocoagulación bipolar fina, puede lograr rápidamente el efecto de coagulación en el momento de inicio, corta automáticamente potencia de salida durante la coagulación del tejido, se logra un excelente efecto de coagulación, y efectivamente prevenir la adhesión del tejido.



Accesorios





55 2390 7756



ventas@derillasass.com
gamuroli@gmail.com



www.derillasass.com



AngelSkin



ANGELSKIN